

## Kit de testare rapidă pentru detectarea antigenului SARS-CoV-2 în probe din nazofaringe și faringe în stadiile incipiente ale bolii

### Descriere:


Este utilizat în perioada de apariție a simptomelor și în perioada de evoluția procesului infecțios. Pentru determinarea antigenului în caz de suspiciune la prezența virusului COVID-19 în organism. Permite luarea unei decizii rapide privind izolarea pentru a proteja persoanele din jur și pe cei dragi. Sensibilitatea testului: până la 92%.

- Nu necesită echipament de laborator suplimentar.
- Timpul de efectuarea testului și obținerea rezultatului - 15 minute.
- Ușurință în utilizare. Posibilitatea de a efectua testarea în afara instituției medicale.
- Obținerea rapidă a rezultatelor testului în stadiile incipiente ale bolii (la apariția noilor simptome).


### Componența kit-ului:

1. Casetă de testare (în folie individuală sterilă, completată cu desicant) - 1 buc.
2. Lichid tampon într-un tub de plastic - 1 buc.
3. Bețigaș de bumbac pentru prelevarea de probe din nazofaringe și faringe - 1 buc.
4. Duză cu picurător - 1 buc.
5. Instrucțiuni de utilizare - 1 buc.

### Colectarea probelor:

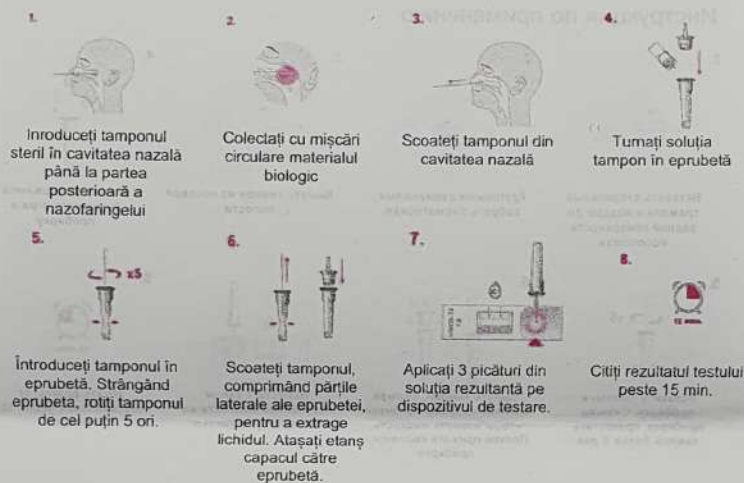

### Interpretarea rezultatelor:

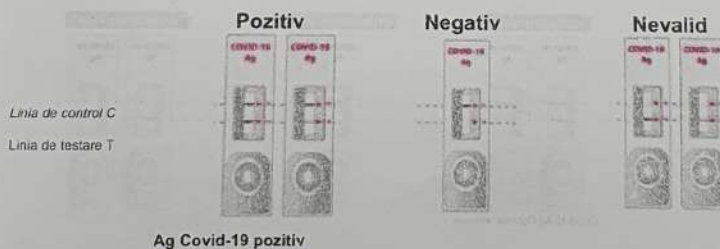

**Linia de control C** apare la 5 minute după ce lichidul intră în fereastra de recepție. Absența liniei C indică o procedură de testare incorectă!

**Linia T** apare numai dacă în probă sunt prezenți antigeni SARS-CoV-2. Intensitatea culorii liniei de testare va varia în funcție de cantitatea de antigen SARS-CoV-2 prezentă în probe. Linia apare în 5-15 minute (dar nu mai mult de 30 de minute) după ce lichidul testat intră în fereastra de recepție. Dacă antigenele SARS-CoV-2 sunt absente în probe, linia de testare nu apare.

### Condiții de păstrare:

Kit-ul poate fi păstrat la temperaturi cuprinse între 2 și 30 °C, departe de lumina directă a soarelui.

Materialele kit-ului sunt stabile până la data de expirare tipărită pe cutie.

A nu se îngheța.

A se utiliza în decurs de o oră după deschiderea ambalajului steril.

PRODUCĂTOR: Nantong Egens Biotechnology Co., Ltd  
Building 15, Building 12 (west), No. 1692 Xinghu Avenue, Nantong Economy & Technology Development zone, 226010 Nantong, People of Republic of China.

IMPORTĂTOR: ÎCS "Farmina" SRL, str. Ciocana 8/1, mun. Chișinău, Republica Moldova. Tel.: + 373 22 421801