

Spray Nazal
**CONGESTIE NAZALĂ
HIPERTONIC
APĂ DE MARE**

Nazomarin®

Nazomarin® Hipertonic Apă de Mare Hipertonică - Spray nazal

O igienă nazală adecvată este importantă la sugari, copiii și adulți. Excesul de mucus în cavitățile nazale poate determina proliferarea microbiană și uscăciunea excesivă a mucoasei nazale.

Nazomarin® Hipertonic hidratează puternic cavitățile nazale, iar datorită acțiunii sale mecanice ajută la curățarea și drenajul mucusului, ceea ce permite obținerea cu ușurință a permeabilității căilor nazale.

Nazomarin® Hipertonic Apă de Mare păstrează proprietățile vitale specifice ale apei de mare naturale.

Nazomarin® Hipertonic Apă de Mare provine din Golful Cancale din Bretania (Franța), renumit pentru calitatea apelor sale. Golful Cancale este caracterizat de o amplitudine înaltă a mareelor (12 m) și curenți puternici care previn poluarea apelor. Această combinație unică asigură ca apa să fie în permanență reînnoită și, prin urmare, constant pură. Prelevarea probelor se realizează automat când calitatea apei este optimă (după perioada de maree înalte). Zona de prelevare este clasificată ca Clasa A și se află sub control continuu de monitorizare a calității (contaminare microbiologică, chimică, fitoplancton, pH etc.).

Compoziție:

100% apă de mare diluată cu apă purificată, echivalent a 2.2 % clorură de sodiu.

Indicații:

Spray-ul nazal hipertonic Nazomarin® Hipertonic Apă de Mare este un dispozitiv medical care poate fi utilizat la copii cu vârsta peste 3 ani și adulți, în caz de infecție a mucoasei nazofaringiene, secreții nazale și infecție a sinusurilor paranasale și în cazul sforăitului cauzat de membranele mucoase uscate. Spray-ul nazal hipertonic elimină excesul de lichide din celulele membranare ale mucoasei nazale pe baza efectului osmotic la soluția hipertonică. Pe lângă decongestionarea și curățarea mecanică a tractului respirator superior, acest efect osmotic ajută la reducerea edemului mucoaselor.

Utilizarea corectă de Nazomarin® Hipertonic Apă de mare în igiena nazală zilnică oferă un tratament adjuvant în unele indicații de bază, cum ar fi: rinofaringită, rinită obstructivă și sinuzită, uscăciune a mucoasei nazale, răgușeală datorată mucoaselor uscate, afecțiuni ORL și tratamentul pediatric.

Instrucțiuni de utilizare:

1. Scoateți capacul de protecție.
2. Introduceți ușor aplicatorul nazal într-o nară și acționați pompa pentru a pulveriza produsul.
3. Lăsați să curgă excesul de soluție pentru a extrage mucusul, apoi suflați nasul.
4. Repetați procesul cu cealaltă nară.
5. Curățați vârful aplicatorului cu apă și uscați.
6. Acoperiți aplicatorul nazal cu capacul de protecție

până la următoarea utilizare.

Aplicați în fiecare nară de câte ori este necesar.

Instrucțiuni pentru utilizarea produsului la copii:

1. Așezați copilul în poziția culcat pe spate cu capul ușor înclinat într-o parte pentru a facilita pătrunderea soluției în nară.
 2. Pulverizați timp de câteva secunde acționând capul de pulverizare.
 3. Ridicați copilul în poziție verticală și lăsați soluția să curgă. Colectați mucusul eliminat cu un șervețel.
 4. Repetați aplicarea în cealaltă nară.
 5. Ștergeți ușor cu un șervețel în jurul nărilor fără a introduce șervețelul adânc în nasul bebelușului. Curățați vârful aplicatorului cu apă și uscați.
- Aplicați în fiecare nară de 2 până la 3 ori pe zi.

Contraindicații și efecte adverse:

Nu au fost raportate efecte adverse la utilizarea dozelor terapeutice recomandate, dar dacă prezentați reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Orice eveniment advers grav legat de acest produs trebuie raportat producătorului, distribuitorului și autorității naționale de sănătate din țara dumneavoastră.

Atenționări și precauții:

- Din motive de igienă și pentru a preveni transmiterea agenților patogeni, acest recipient trebuie utilizat doar de către o singură persoană.
- A nu se lăsa la vedere și îndemâna copiilor.

Păstrare și data de expirare:

- Nu utilizați produsul după data de expirare afișată pe cutie și pe flacon.
- A se păstra la loc uscat și răcoros.
- Depozitați flaconul și capacul de protecție în ambalajul corespunzător.

Forme disponibile:

Flacon pulverizator presurizat cu aplicator nazal ce conține 120 ml soluție. Este disponibil în 1 formă:
- Nazomarin® Hipertonic Apă de Mare spray nazal hipertonic - Difuzie medie. Adulți și copii cu vârsta de la 3 ani.

Data ultimei revizuirii a textului: 27.01.2021

Reprezentant autorizat în Republica Moldova:

S.C. TOP-PHARMA S.R.L.

str. A. Bernardazzi 78,
MD-2009, Chișinău.
www.toppharma.md

PHARMALINK S.L.

Av. Universitat Autònoma 13,
Parc Tecnològic del Vallès
08290 Cerdanyola del Vallès,
Barcelona, Spania

REF PL0033_120_Medium



Назальный спрей
ЗАЛОЖЕННОСТЬ НОСА
ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ
МОРСКАЯ ВОДА

Назомарин®

Назомарин® Гипертоническая Морская Вода - назальный спрей

Адекватная гигиена носа важна для младенцев, детей и взрослых. Избыток слизи в носовых полостях может вызвать микробную пролиферацию и чрезмерную сухость слизистой оболочки носа.

Назомарин® Гипертоническая морская вода сильно увлажняет полости носа и благодаря своему механическому действию, путем дренирования слизи, способствует очистке, и легко позволяет добиться проходимости носовых ходов.

Назомарин® Гипертоническая морская вода сохраняет специфику жизненно важных свойств природной морской воды.

Назомарин® Гипертоническая морская вода происходит из залива Канкаль в Бретани (Франция), известного своим качеством воды. Залив Канкаль характеризуется большой амплитудой прилива (12 м) и сильными течениями, препятствующими загрязнению воды. Эта уникальная комбинация обеспечивает постоянное обновление воды и, следовательно, ее постоянную чистоту. Отбор проб производится автоматически при оптимальном качестве воды (после периода прилива). Зона отбора проб относится к классу А и находится под постоянным контролем качества (микробиологическое, химическое загрязнение, фитопланктон, pH и т.д.).

Состав: 100% морская вода, разбавленная очищенной водой, эквивалент 2,2% хлорида натрия.

Показания: Гипертонический назальный спрей

Назомарин® Гипертоническая Морская Вода это медицинское изделие, которое может применяться у детей от 3-х лет и у взрослых, при инфекциях слизистых оболочек носоглотки, выделениях из носа и инфекциях придаточных пазух носа, а также при храпе, вызванном сухостью слизистых оболочек. Гипертонический назальный спрей выводит избыток жидкости из мембран клеток слизистых оболочек носа за счет осмотического действия гипертонического раствора. В дополнение к деконгестии и механической очистке верхних дыхательных путей этот осмотический эффект способствует уменьшению отека слизистой оболочки.

Правильное использование Назомарин® Гипертоническая Морская Вода для ежедневной гигиены носа обеспечивает дополнительное лечение при некоторых основных показаниях, таких как: назофарингит, обструктивный ринит и синусит, сухость слизистых оболочек носа, охриплость голоса из-за сухости слизистых оболочек, ЛОР-заболевания и лечение в педиатрии.

Инструкции по применению:

1. Снимите защитный колпачок.
2. Аккуратно вставьте назальный аппликатор в одну ноздрию и надавите на помпу, чтобы распылить продукт.
3. Дайте вытечь лишнему раствору, чтобы дренировать слизь, затем высморкайте нос.
4. Повторите процедуру с другой ноздрей.
5. Очистите кончик аппликатора водой и высушите.
6. Накройте назальный аппликатор защитным колпачком до следующего использования.

ком до следующего использования.

Применять в каждую ноздрию так часто, как это необходимо.

Инструкции по применению продукта для ребенка:

1. Уложите ребенка, слегка наклонив голову набок, чтобы облегчить попадание морской воды в ноздрию.
2. Распылите в течение нескольких секунд, нажимая на распылительную головку.
3. Посадите ребенка вертикально, чтобы раствор вытек из носа. Соберите выделенную слизь салфеткой.
4. Повторите аппликацию в другую ноздрию.
5. Аккуратно протрите ноздри, не засовывая салфетку глубоко в нос ребенка. Очистите наконечник водой и высушите.

Закапывать в каждую ноздрию 2-3 раза в день.

Противопоказания и побочные эффекты:

• При использовании рекомендуемых терапевтических доз, побочные эффекты не описаны, но если вы испытываете побочные эффекты, обратитесь к лечащему врачу или фармацевту.

• О любом серьезном нежелательном явлении, связанном с этим продуктом, необходимо сообщать производителю, дистрибьютору и национальному органу здравоохранения в вашей стране.

Предупреждения и меры предосторожности:

• Из соображений гигиены и предотвращения передачи патогенов этот контейнер должен использоваться только одним человеком.

• Хранить в недоступном для детей месте.

Хранение и срок и годности:

• Не используйте продукт после истечения срока годности, указанного на коробке и флаконе.

• Хранить в сухом и прохладном месте.

• Поместите флакон и защитный колпачок в соответствующую упаковку.

Доступные формы выпуска: Флакон-распылитель под давлением с назальным аппликатором, содержащий 120 мл раствора. Доступен в форме: - Назомарин® Гипертоническая морская вода спрей назальный изотонический – Средняя дисперсия. Взрослым и детям от 3 лет.

Дата последнего пересмотра текста: 27.01.2021

Авторизованный представитель в Республике Молдова:

ТОП-ФАРМА ООО
ул. А. Бернардацци 78,
MD-2009, Кишинев.
www.toppharma.md

■ ФАРМАЛИНК С. Л.

Пр. Университат Аутонома 13, Технологический Парк дель Вальес, 08290 Серданьола-дель-Вальес, Барселона, Испания

REF PL0033_120_Medium

